

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección: Calle 28 # 15-120

Municipio: DUITAMA

Fecha de Elaboración: Enero 2022

Vigencia: 2022

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico: \$ 100.000.000

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsables	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AGITADOR DE MAZZINI Marca: BOECO Modelo: 05-20 Serie: 8059001 / 010108-1001-0032	Laboratorio Clínico -Toma de Muestras	1066	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general. Calibración anual, variable rpm, normatividad vigente. Fecha de calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
AGITADOR HEMATOLOGICO VASCULANTE Marca: INDULAB Modelo: 2007 Serie: A-2007	Laboratorio Clínico -Toma de Muestras	1042	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general. Calibración anual, variable rpm, normatividad vigente. Fecha de calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33479	Consultorio Odontología 5	1443	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33278	Consultorio Odontología 2	695	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33284	Consultorio Odontología 1	1442	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 36005	Desplazamiento Odontología	2916	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX401 Serie: 33476	Consultorio Odontología 6	593	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: MILLENIUM Modelo: 2000 Serie: AAA1188	Unidad móvil 2	2891	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: GNATUS Modelo: MIX II Serie: 44664420024	Consultorio Odontología Centro Amigable	1209	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
BALANZA DIGITAL Marca: SECA Modelo: 813 Serie: 8813093171673	Consultorio enfermería 2	3539	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015615	Consultorio de medicina 1 sede Principal	3	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015688	Consultorio de medicina 2 sede Principal	30	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015687	Consultorio de medicina 3 sede Principal	58	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015677	Consultorio de medicina 4 sede Principal	82	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015678	Consultorio de medicina 5 sede Principal	107	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015676	Consultorio de medicina 6 sede Principal	133	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015626	Consultorio de medicina 7 sede Principal	162	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015672	Consultorio de medicina 8 sede Principal	1723	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015684	Consultorio de medicina 9 sede Principal	203	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015696	Consultorio de medicina 10 sede Principal	415	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 8440071757	Consultorio de medicina 11 sede Principal	3571	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 500000795	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	484	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000001455	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	759	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015625	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	439	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo:500KL Serie: 5990003230	Sala de estimulación sede Principal	239	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 50000205277	Consultorio de odontología 1 sede Principal	709	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000021277	Consultorio de odontología 4 sede Principal	656	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000001463	Consultorio de odontología 7 sede Principal	589	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5990003231	Consultorio de odontología PyP sede Principal	624	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015683	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	178	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015600	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1715	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015671	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1724	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015673	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1719	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015674	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1720	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015652	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1721	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015651	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1722	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015695	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	1718	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015637	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1717	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015599	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1716	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000005129	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1235	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000018578	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1191	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 3500015638	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1219	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000002127	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	1271	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000001448	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1391	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000001462	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	1309	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 522KL PESA BEBES Serie: 5220001234	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	2568	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000225	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	2084	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 522000245	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	2113	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 522000818	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	686	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 522000360	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1587	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001233	Consultorio de medicina 5 sede Principal	417	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001255	Consultorio de medicina 9 sede Principal	211	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000424	Sala de lactancia sede Principal	2033	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000250	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	440	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001243	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1390	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005590	Desplazamientos Enfermería sede Principal	3507	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2022.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 142KL 1420052794	Sala EDA	2969	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2022.
BALANZA DIGITAL SOEHNLE ANALOGA N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Siratá	2289	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
BALANZA DIGITAL TEZZIO PISO QC PASS07	Unidad Móvil 2	2887	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.

BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT WNB7 DIN12876-3-K1	Toma de Muestras	1055	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT W200 DIN12877-K1	Toma de Muestras	1053	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO AHC- 4D2 2011-56720	Toma de Muestras	1040	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de circuitos eléctricos, cambio de filtro epa, revisión de motor, limpieza, pruebas de funcionamiento, limpieza general.
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130- 26534	Consultorio de odontología 1 sede Principal	674	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130- 26528	Consultorio de odontología PyP sede Principal	625	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130- 26518	Consultorio de odontología PyP sede Principal	595	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130- 26523	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1211	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III 4710009	Toma de Muestras	1063	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CENTRIFUGA HEMATOCRITO HETTICH HAEMATOCRIT D- 78532	Toma de Muestras	1061	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III A 524063	Toma de Muestras	3248	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CONTADOR DE CELULAS KRAMER IMP-001 1355901/ 414	Toma de Muestras	1043	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, ajuste de conectores si se requiere, pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.

DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0343498-10	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	488	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341114-10	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1231	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341121-10	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1188	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341116-10	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1385	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ N.R.	Desplazamientos Medicina sede Principal	1806	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601C 360251-M1841402000	Sala de ECG	3600	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verificar tensión de entrada o voltaje de baterías. Revisión de estabilidad del soporte del equipo. Revisión del correcto funcionamiento panel frontal y teclas de mando. Verificación funcionamiento de electrodos, cables y fusibles. Revisión y limpieza de tarjeta electrónica. Verificación de respuesta, calidad de trazo, impresión y transporte del papel. Limpieza general.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 19090 29000	Ambulancia sede Principal	6833	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 19090 N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 N.R.	Consultorio de medicina 1 sede Principal	330	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 2 sede Principal	197	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 3 sede Principal	256	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 4 sede Principal	340	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 5 sede Principal	344	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 6 sede Principal	350	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 7 sede Principal	251	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 8 sede Principal	246	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 9 sede Principal	353	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 10 sede Principal	464	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 11 sede Principal	690	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	567	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	4476	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	359	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	367	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	375	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	385	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Desplazamientos Medicina sede Principal	689	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Desplazamientos Enfermería sede Principal	688	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO / PERIAPICAL FIAD FIRENCE BNBZ ZCYD0011	Sala de rayos X odontológico sede Principal	3632	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar conector de tubo de rayos X. Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos. Verificar estado de perillas, y lámpara indicadora. Lubricar articulación de brazo porta tubo, si es necesario. Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea. Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición. Verificar funcionamiento con el operador del equipo.
FONENDOSCOPIO N.R. N.R. N.R.	Consultorio de medicina 2 sede Principal	198	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 1 sede Principal	331	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 3 sede Principal	257	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 4 sede Principal	340	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 5 sede Principal	345	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 6 sede Principal	351	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 7 sede Principal	252	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 8 sede Principal	247	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 9 sede Principal	354	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 10 sede Principal	465	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 11 sede Principal	840	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	568	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	556	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	4478	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	360	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	4444	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	6500	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	839	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	377	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Sala de procedimientos menores sede Principal	670	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Desplazamientos Enfermería sede Principal	841	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Desplazamientos Medicina sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD ADULTO N.R.	Unidad Móvil 2	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. ADULTO N.R.	Ambulancia sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. ADULTO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Consultorio de medicina 5 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. PEDIÁTRICO N.R.	Ambulancia sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIÁTRICO N.R.	Sala ERA 2 sede Principal	6512	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIÁTRICO N.R.	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIÁTRICO N.R.	Sala ERA 1 sede Principal	693	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
GLUCOMETRO ON CALL PLUS PLUS N.R.	Laboratorio clínico sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo. Revisión de tarjeta electrónica y batería. Revisión de parámetros. Pruebas de funcionamiento y operatividad. Limpieza general
GLUCOMETRO ON CALL PLUS PLUS N.R.	Desplazamientos Medicina sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo. Revisión de tarjeta electrónica y batería. Revisión de parámetros. Pruebas de funcionamiento y operatividad. Limpieza general
INCUBADORA CULTIVOS BINDER BD53 06-00869	Laboratorio clínico sede Principal	1038	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobre temperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.

INCUBADORA BIOLÓGICOS EZ TEST 1401 8012456	Esterilización sede Principal	313	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobre temperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
INCUBADORA 3M 390 70200771809 / 309513	Esterilización sede Principal	3208	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobre temperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
INFANTOMETRO SECA 417 N.R.	Consultorio de medicina 5 sede Principal	3681	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	2139	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1988	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	2112	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1968	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	2441	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2888	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	1675	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	2205	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Sala de procedimientos menores sede Principal	1967	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858528	Consultorio de odontología 1 sede Principal	713	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6822019	Consultorio de odontología 7 sede Principal	613	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858808	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1210	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858667	Desplazamientos Odontología sede Principal	2282	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 695A 10715	Consultorio de odontología 5 sede Principal	641	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.

LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36531	Unidad móvil 2 sede Principal	577	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36527	Consultorio de odontología 2 sede Principal	1449	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36533	Consultorio de odontología 3 sede Principal	592	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36537	Consultorio de odontología 4 sede Principal	1448	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36529	Consultorio de odontología 6 sede Principal	1450	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.

LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36526	Consultorio de odontología PyP sede Principal	1454	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 02J32878 / 01F67537	Laboratorio clínico sede Principal	46	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 01F76072	Laboratorio clínico sede Principal	39	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 11A1700	Laboratorio clínico sede Principal	35	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19125L 03H99998	Laboratorio clínico sede Principal	38	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L 04H06797	Laboratorio clínico sede Principal	40	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.

MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L 05676923	Laboratorio clínico sede Principal	36	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19130L CR61859	Laboratorio clínico sede Principal	877	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L C532748	Laboratorio clínico sede Principal	876	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2022.
MICROSCOPIO OLYMPUS CX21FS1 2J00328	Laboratorio clínico sede Principal	1067	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
MICROSCOPIO OLYMPUS CHS 4D0035	Laboratorio clínico sede Principal	1069	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.

NEBULIZADOR THOMAS 1125 20600008517	Ambulancia sede Principal	2270	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN M50 333123- M15503310017	Ambulancia sede Principal	3045	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar el equipo en forma externa. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.). Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG, Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posee el equipo. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. verificar estado y carga de batería. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2691	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	7250	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2689	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	1962	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2886	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2893	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Sala de rayos X odontológico sede Principal	1916	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.

NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Oficina Mantenimiento sede Principal	1839	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
OXIMETRO DE PULSO RIESTER RI-FOX N 901362	Ambulancia sede Principal	429	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036- M13300290033	Sala ERA 2 sede Principal	2724	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO HUNTLEIGH SMARTSIGNS MINIPULSE 750AAX0102081	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1386	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036- M1330020033	Sala ERA 1 sede Principal	2859	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO KONICA MINOLTA PULSOX-2 32864	Desplazamientos Medicina sede Principal	4492	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 1 sede Principal	1098	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 2 sede Principal	4501	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 3 sede Principal	4499	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 4 sede Principal	4497	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 5 sede Principal	No registra	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 6 sede Principal	6198	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 7 sede Principal	No registra	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología PyP sede Principal	1179	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	4936	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Desplazamientos Odontología sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 1 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 3 sede Principal	444	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 4 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 5 sede Principal	449	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 6 sede Principal	4482	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 7 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología PyP sede Principal	1621	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología PyP sede Principal	1622	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología PyP sede Principal	4483	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Desplazamientos Odontología sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
SUCCIONADOR SILFAB N8V 10-0105-07-A	Ambulancia sede Principal	61	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos). Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Revisar sellado de nivel de líquido. Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 1 sede Principal	3674	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 3 sede Principal	3675	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 6 sede Principal	3676	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 8 sede Principal	3677	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 11 sede Principal	3678	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	3680	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio PyP Enfermería 4	3679	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4991	Consultorio de medicina 10 sede Principal	414	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4645	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1190	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4992	Sala de procedimientos menores sede Principal	1349	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4816	Consultorio de medicina 2 sede Principal	28	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4506	Consultorio de medicina 3 sede Principal	57	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 80818195622	Consultorio de medicina 3 sede Principal	258	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4827	Consultorio de medicina 4 sede Principal	81	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4663	Consultorio de medicina 5 sede Principal	106	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4508	Consultorio de medicina 6 sede Principal	132	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4999	Consultorio de medicina 7 sede Principal	161	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4834	Consultorio de medicina 9 sede Principal	202	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4582	Consultorio de medicina 11 sede Principal	1686	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4700	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	438	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4917	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1233	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4906	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	1307	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5011	Sala de procedimientos menores sede Principal	1364	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5060	Consultorio medicina Servicio Extramural Avenida 1	1687	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5060	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1680	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4884	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1684	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4952	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1676	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4738	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1677	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4821	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1685	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4969	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1683	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4822	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	1679	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4517	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1678	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4601	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1681	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2885	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4714	Consultorio de medicina 1 sede Principal	2	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4662	Consultorio de medicina 8 sede Principal	177	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO LORD ADULTO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO LORD ADULTO N.R.	Ambulancia sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271373	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	370	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271816	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	379	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO N.R.	Consultorio de medicina 10 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271861	Consultorio de medicina 9 sede Principal	355	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 264314	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	6862	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN 297 91207172711	Sala ERA 2 sede Principal	4575	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN N.R. 140207090553	Sala ERA 1 sede Principal	697	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 91217062331	Desplazamientos Medicina sede Principal	4573	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 91217062331	Desplazamientos Enfermería sede Principal	4574	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO TYCOS ADULTO 9601092187	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	7190	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO TYCOS PEDIÁTRICO 9408230229	Sala de procedimientos menores sede Principal	1360	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Ambulancia sede Principal	106	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 90918195622	Consultorio de medicina 2 sede Principal	29	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 9410201197	Consultorio de medicina 5 sede Principal	346	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 61128070892	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	569	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 61116215301	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	563	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 80808203631	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	361	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 80617171243	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	369	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 70227185281	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	6870	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Sala ERA 1 sede Principal	696	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 70227185281	Sala de rehidratación oral sede Principal	378	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 110802134	Desplazamientos Enfermería sede Principal	7195	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 1,10329E+11	Desplazamientos Medicina sede Principal	7137	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2022.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ARDENT N.R. N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2894	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL OD PORTATIL OD-2 SIN 618290	Oficina Mantenimiento sede Principal	2415	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL ZUBI-OLA N.R. N.R.	Oficina Mantenimiento sede Principal	1699	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2280	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ESQCAM N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Florida	1930	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ESQCAM N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	3287	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA DINAMIK 626 N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural San Lorenzo	3289	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2366	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA DINAMIK V-920 20057 1345	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	3285	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011395	Consultorio de odontología 1 sede Principal	710	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011401	Consultorio de odontología 2 sede Principal	691	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011410	Consultorio de odontología 3 sede Principal	669	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011402	Consultorio de odontología 4 sede Principal	653	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011429	Consultorio de odontología 5 sede Principal	637	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011414	Consultorio de odontología 6 sede Principal	590	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011430	Consultorio de odontología 7 sede Principal	573	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA MODELO:GNATUS CADEIRA SYNCRUS SERIE: 4483598001	Consultorio de odontología PyP sede Principal	622	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA - MODELO: RITTER EXCELLENCE - SERIE: RE11011424	Consultorio de odontología PyP sede Principal	611	Trimestral	02-09-16-23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA - MODLEO: RITTER EXCELLENCE - SERIE: RS08090153	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1205	Trimestral	02-09-16-23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	3906	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	3907	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 4	909	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 5	3910	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 7	3911	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 9	3912	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 12	3913	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Centro Amigo	3914	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 10	3915	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural Trinidad	3926	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural San Lorenzo	3927	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural Florida	3990	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural El Carmén	3938	Trimestral	02-09-16- 23-29	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	3991	Trimestral	02-09-16- 23-30	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.


TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural Avendaños	3933	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400777/1912290 0278	Consultorio Medicina 1	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400187/1912290 0275	Consultorio Medicina 2	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200026/1912300 0034	Consultorio Medicina 3	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL20029/19123000 028	Consultorio Medicina 4	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400778/1912290 0277	Consultorio Medicina 5	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200031/1912300 0026	Consultorio Medicina 6	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL4007797/191229 00279	Consultorio Medicina 7	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.

OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL2000027/191230 00027	Consultorio Medicina 8	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200040/1912300 0032	Consultorio Medicina 10	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL2000747/191230 00199	Consultorio Medicina 11	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400782/1912290 0283	Consultorio Medicina 12	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200028/1912300 0031	Consultorio Medicina Prioritaria 2	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400780/1912290 0280	Consultorio de Gestantes Centro Amigo	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200033/1912300 0040	Consultorio Medicina Centro Amigo	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400783/1912290 0284	Consultorio Crónicos	N.R.	Trimestral	02-09-16- 23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.

<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - MARCA: MINDRAY - MODELO: BENEHEART D1 - SERIE: FQ-01046193</p>	Sala de Espera Prioritaria	3835	Trimestral	02-09-16-23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Comprobar que el indicador de estado está verde. Comprobar el estado del equipo y de los accesorios. Efectuar la prueba de usuario. Comprobar la fecha de caducidad de los electrodos y de la batería. Prueba de encendido: Cada vez que enciende el equipo, aparece la pantalla de bienvenida y el equipo inicia la prueba de encendido de inmediato. Si se detecta un error, se muestra información relativa al mismo. Prueba en tiempo real: La prueba en tiempo real se mantiene durante todo el periodo de funcionamiento del equipo. Si se detecta un error, se activa la alarma correspondiente. Prueba de la batería: Si la batería está instalada, se efectúa la prueba de la batería de forma automática en 5 minutos tras el encendido del equipo. Puede seguir las instrucciones de pantalla y comprobar lo siguiente: Pulse las teclas de software correspondientes y el botón Descarga como se indica en la pantalla, seleccione una opción para responder al equipo y ha escuchado la indicación de voz. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
<p>BÁSCULA PESA BEBE - MARCA: SECA - MODELO: 333 - SERIE: 1000000211722</p>	Sala de Lactancia Materna	3964	Trimestral	02-09-16-23-31	04-07-10	2022	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2022.
<p>INFANTÓMETRO - MARCA: SECA - MODELO: 417 - SERIE: N.R.</p>	Sala de Lactancia Materna	2955	Trimestral	02-09-16-23-32	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
<p>MICROSCOPIO - MARCA: OLYMPUS - MODELO: CX23 - SERIE: 9J87164/201909</p>	Laboratorio clínico sede Principal	4099	Trimestral	02-09-16-23-32	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.



DIRECTOR/GERENTE

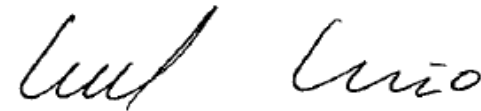

JEFE DE MANTENIMIENTO