

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección: Calle 28 # 15-120

Municipio: DUITAMA

Fecha de Elaboración: Enero 2023

Vigencia: 2023

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico: \$ 100.000.000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsables	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AGITADOR DE MAZZINI Marca: BOECO Modelo: OS-20 Serie: 8059001 / 010108-1001-0032	Laboratorio clínico	1066	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.
AGITADOR HEMATOLOGICO VASCULANTE Marca: INDULAB Modelo: 2007 Serie: A-2007	Laboratorio clínico	1042	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33278	Consultorio Odontología 2	695	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33284	Consultorio Odontología PYP	1442	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 36005	Desplazamiento Odontología	2916	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

AMALGAMADOR Marca: MILLENIUM Modelo: 2000 Serie: AAA1188	Unidad móvil 2	2891	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: GNATUS Modelo: MIX II Serie: 44664420024	Consultorio Odontología Centro Amigable	1209	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
BALANZA DIGITAL Marca: SECA Modelo: 813 Serie: 8813093171673	Consultorio enfermería 3	3539	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015615	Consultorio Medicina 1	3	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015688	Consultorio Medicina 2	30	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015687	Consultorio Medicina 3	58	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015677	Consultorio Medicina 4	82	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015678	Consultorio Medicina 5	107	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015676	Consultorio Medicina 6	133	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015626	Consultorio Medicina 8	162	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015672	Consultorio Medicina 7	1723	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015684	Consultorio Medicina 9	203	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015696	Consultorio Medicina 10	415	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 500000795	Consultorio enfermería centro amigable	484	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015625	Consultorio enfermería 5	439	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo:500KL Serie: 5990003230	Sala de estimulación sede Principal	239	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 50000205277	Consultorio enfermería 1 Rosado	709	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000021277	Consultorio Enfermería 4 Rosado	656	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000001463	Consultorio odontología 6	589	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5990003231	Consultorio Medicina 13	624	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015683	Consultorio Medicina Servicio Extramural Avendaños	178	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015600	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1715	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015671	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1724	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015673	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1719	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015674	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1720	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015652	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1721	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015651	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1722	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015695	Consultorio Medicina Servicio Extramural El Carmén	1718	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015637	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1717	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015599	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1716	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000005129	Consultorio medicina centro amigable	1235	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000018578	Consultorio medicina gestantes centro amigable	1191	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 3500015638	Consultorio Odontología Centro Amigable	1219	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000002127	Consultorio enfermería 2 Gestantes	1271	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000001448	Consultorio medicina prioritaria 2	1391	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000001462	Consultorio medicina prioritaria 1	1309	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 522KL PESA BEBES Serie: 5220001234	Consultorio Medicina Servicio Extramural Avendaños	2568	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000225	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	2084	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000245	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	2113	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 522000818	Consultorio Medicina Servicio Extramural El Carmén	686	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000360	Consultorio Medicina 8	1587	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001233	Consultorio Medicina 5	417	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001255	Consultorio Medicina 9	211	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000424	Consultorio Medicina 10	2033	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000250	Consultorio enfermería 5	440	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001243	Consultorio medicina prioritaria 1	1390	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005590	Desplazamientos Enfermería	3507	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Junio de 2023..
BALANZA DIGITAL SOEHNLE ANALOGA N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Siratá	2289	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT WNB7 DIN12876-3-K1	Laboratorio clínico	1055	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT W200 DIN12877-K1	Laboratorio clínico	1053	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO AHC- 4D2 2011-56720	Laboratorio clínico	1040	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de circuitos eléctricos, cambio de filtro epa, revisión de motor, limpieza, pruebas de funcionamiento, limpieza general.
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26534	Consultorio Odontología 1	674	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26528	Consultorio Odontología PYP	625	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26518	Consultorio Odontología PYP	595	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26523	Consultorio Odontología Centro Amigable	1211	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III 4710009	Laboratorio clínico	1063	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CENTRIFUGA HEMATOCRITO HETTICH HAEMATOCRIT D- 78532	Laboratorio clínico	1061	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III A 524063	Laboratorio clínico	3248	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, porta tubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CONTADOR DE CELULAS KRAMER IMP-001 1355901/ 414	Laboratorio clínico	1043	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, ajuste de conectores si se requiere, pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.

DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0343498-10	Consultorio enfermería 2 Gestantes	488	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341121-10	Consultorio Medicina 11	1188	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341116-10	Consultorio medicina prioritaria 2	1385	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ N.R.	Desplazamientos Medicina	1806	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601C 360251-M1841402000	Sala de ECG	3600	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verificar tensión de entrada o voltaje de baterías. Revisión de estabilidad del soporte del equipo. Revisión del correcto funcionamiento panel frontal y teclas de mando. Verificación funcionamiento de electrodos, cables y fusibles. Revisión y limpieza de tarjeta electrónica. Verificación de respuesta, calidad de trazo, impresión y transporte del papel. Limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 19090 29000	Ambulancia	6833	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 19090 N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 N.R.	Consultorio Medicina 1	330	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 2	197	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 3	256	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 4	340	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 5	344	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 6	350	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 7	251	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 8	246	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 9	353	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 10	464	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio Medicina 11	690	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio medicina gestantes centro amigable	567	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio enfermería 5	4476	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio medicina centro amigable	359	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio medicina prioritaria 1	375	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio medicina prioritaria 2	385	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Desplazamientos Medicina	689	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Desplazamientos Enfermería	688	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO / PERIAPICAL FIAD FIRENCE BNBN ZCYD0011	Sala de rayos X odontológico	3632	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar conector de tubo de rayos X. Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos. Verificar estado de perillas, y lámpara indicadora. Lubricar articulación de brazo porta tubo, si es necesario. Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea. Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición. Verificar funcionamiento con el operador del equipo.
FONENDOSCOPIO N.R./ADULTO/ N.R.	Consultorio Medicina 2	198	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 1	331	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 3	257	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 4	340	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 5	345	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 6	351	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 7	252	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 8	247	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO N.R.	Consultorio Medicina 9	354	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 10	465	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio Medicina 11	840	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio medicina gestantes centro amigable	568	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio enfermería 1 Rosado	556	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio enfermería 3	4478	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	Consultorio medicina centro amigable	360	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio enfermería centro amigable	4444	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO PRESTIGE	Consultorio medicina prioritaria 1	839	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Sala de procedimientos menores	670	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Desplazamientos Enfermería	841	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Desplazamientos Medicina	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD ADULTO N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. ADULTO N.R.	Ambulancia	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. ADULTO N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. PEDIÁTRICO N.R.	Ambulancia	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ADULTO N.R.	Sala ERA 2	6512	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN LIGHTWEIGHT	Consultorio enfermería 2 Gestantes	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO PRESTIGE.	Sala ERA 1	693	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
INCUBADORA CULTIVOS BINDER BD53 06-00869	Laboratorio clínico	1038	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobre temperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5:). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.

INCUBADORA 3M 390 70200771809 / 309513	Esterilización	3208	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobre temperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5:). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
INFANTOMETRO SECA 417 N.R.	Consultorio Medicina 6	3681	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio Medicina Servicio Extramural Avenidaños	2139	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1988	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	2112	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1968	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	2441	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858808	Consultorio Odontología Centro Amigable	1210	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36531	Unidad móvil 2	577	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36527	Consultorio Odontología 2	1449	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36537	Consultorio odontología 4	1448	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36529	Consultorio Odontología 6	1450	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 02J32878 / 01F67537	Laboratorio clínico	46	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 01F76072	Laboratorio clínico	39	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 11A1700	Laboratorio clínico	35	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19125L 03H99998	Laboratorio clínico	38	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L 04H06797	Laboratorio clínico	40	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.

MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L 05676923	Laboratorio clínico	36	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19130L CR61859	Laboratorio clínico	877	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L CS32748	Laboratorio clínico	876	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la Micropipetas. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2023.
NEBULIZADOR THOMAS 1125 20600008517	Ambulancia	2270	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN M50 333123- M15503310017	Ambulancia	3045	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar el equipo en forma externa. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.). Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG, Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. verificar estado y carga de batería. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avenidaños 1	2691	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.

NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	7250	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural El carmén	2689	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	1962	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Unidad móvil 2	2886	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Unidad móvil 2	2893	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Sala de rayos X odontológico	1916	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
OXIMETRO DE PULSO RIESTER RI-FOX N 901362	Ambulancia	429	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M13300290033	Sala ERA 2	2724	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO HUNTLEIGH SMARTSIGNS MINIPULSE 750AAX0102081	Consultorio medicina prioritaria 2	1386	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M1330020033	Sala ERA 1	2859	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO KONICA MINOLTA PULSOX-2 32864	Desplazamientos Medicina	4492	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio Odontología 1	1098	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio Odontología 2	4501	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio odontología 3	4499	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI A9817953	Consultorio odontología 4	4497	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI CL500071	Consultorio Odontología 5	No registra	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI DBE20769	Consultorio Odontología 6	6198	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI C1040128	Consultorio odontología 7	No registra	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio Odontología PYP	1179	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI C3Z88752	Consultorio Odontología Centro Amigable	4936	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Desplazamiento Odontología	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C B7365093-E7401698-02080599	Consultorio Odontología 1	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C A0Z01060-EBB10984-0B671120	Consultorio Odontología 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C B73050701/E7401697 1/ 02180044	Consultorio odontología 4	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C A0Z01095/EBB106997 OBL30634	Consultorio Odontología 5	449	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C A0Z01044/EBB10983/ 02180045	Consultorio Odontología 6	4482	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio odontología 7	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C ABEX0093/EBE92216 /02080010	Consultorio Odontología PYP	1621	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C ABEX0091/EBE922155 /02080003	Consultorio Odontología PYP	4483	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C C7701034/EBB10698/ 020800001	Consultorio Odontología Centro Amigable	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Desplazamiento Odontología	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del Micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del Micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
SUCCIONADOR SILFAB N8V 10-0105-07-A	Ambulancia	61	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, biela, anillos). Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Revisar sellado de nivel de líquido. Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio Medicina 1	3674	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio Medicina 3	3675	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio Medicina 6	3676	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio Medicina 8	3677	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio Medicina 11	3678	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio medicina gestantes centro amigable	3680	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio enfermería 5	3679	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TENSIOMETRO ALPK2 500W/2 4991	Consultorio Medicina 10	414	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4645	Consultorio medicina centro amigable	1190	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4816	Consultorio Medicina 2	28	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4506	Consultorio Medicina 3	57	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4827	Consultorio Medicina 4	81	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4663	Consultorio Medicina 5	106	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4508	Consultorio Medicina 6	132	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4999	Consultorio Medicina 7	161	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4834	Consultorio Medicina 9	202	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4582	Consultorio Medicina 11	1686	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4700	Consultorio enfermería 5	438	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4917	Consultorio medicina prioritaria 2	1233	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4906	Consultorio medicina prioritaria 1	1307	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5011	Sala de procedimientos menores	1364	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5060	Consultorio Medicina Servicio Extramural Avenidaños	1687	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5060	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1680	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4884	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1684	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4952	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1676	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4738	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1677	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4821	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1685	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4969	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1683	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4822	Consultorio Medicina Servicio Extramural El Carmén	1679	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4517	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1678	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4601	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1681	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 N.R.	Unidad móvil 2	2885	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4714	Consultorio Medicina 1	2	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO LORD ADULTO N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO LORD ADULTO N.R.	Ambulancia	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271316	Consultorio medicina prioritaria 1	379	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271861	Consultorio Medicina 9	355	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 131015183154	Consultorio enfermería 3	6862	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Unidad móvil 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 297 91207172711	Sala ERA 2	4575	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 140204220821	Sala ERA 1	697	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 91217062331	Desplazamientos Medicina	4573	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 91217062331	Desplazamientos Enfermería	4574	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO TYCOS PEDIÁTRICO 9408230229	Sala de procedimientos menores	1360	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Ambulancia	106	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 90918195622	Consultorio Medicina 2	29	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 61116215301	Consultorio enfermería 1 Rosado	563	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN 0909903140352 N.R.	Consultorio enfermería 2 Gestantes	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 80808203631	Consultorio medicina gestantes centro amigable	361	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 080819075633	Consultorio enfermería centro amigable	6870	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 110802134	Desplazamientos Enfermería	7195	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182	Desplazamientos Medicina	7137	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ARDENT N.R. N.R.	Unidad móvil 2	2894	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL OD PORTATIL OD-2 SIN 618290	Oficina Mantenimiento	2415	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL ZUBI-OLA N.R. N.R.	Oficina Mantenimiento	1699	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2280	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ESQCAM N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Florida	1930	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ESQCAM N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	3287	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA DINAMIK 626 N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural San Lorenzo	3289	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA INDUSTRIAL N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural El carmén	2366	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA DINAMIK V-920 20057 1345	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	3285	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011395	Consultorio Odontología 1	710	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011401	Consultorio Odontología 2	691	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011410	Consultorio odontología 3	669	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011402	Consultorio odontología 4	653	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011429	Consultorio Odontología 5	637	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011414	Consultorio Odontología 6	590	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011430	Consultorio odontología 7	573	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA MODELO:GNATUS CADEIRA SYNCRUS SERIE: 4483598001	Consultorio Odontología PYP	622	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA - MODELO: RITTER EXCELLENCE - SERIE: RE11011424	Consultorio Odontología PYP	611	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA - MODLEO: RITTER EXCELLENCE - SERIE: RS08090153	Consultorio Odontología Centro Amigable	1206	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina prioritaria 2	3906	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina prioritaria 1	3907	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 4	3909	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 5	3910	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 7	3911	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 9	3912	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 12	3913	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina centro amigable	3914	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina 10	3915	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	3926	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural San Lorenzo	3927	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	3990	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural El Carmén	3938	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	3991	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO - MARCA:SECA - MODELO:217 - SERIE: 2171721009	Consultorio Medicina Servicio Extramural Avendaños	3933	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400777/1912290 0278	Consultorio Medicina 1	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400187/1912290 0275	Consultorio Medicina 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.

OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200026/19123000034	Consultorio Medicina 3	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL20029/19123000028	Consultorio Medicina 4	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400778/19122900277	Consultorio Medicina 5	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200031/19123000026	Consultorio Medicina 6	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL4007797/19122900279	Consultorio Medicina 7	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL2000027/19123000027	Consultorio Medicina 8	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200040/19123000032	Consultorio Medicina 10	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL2000747/19123000199	Consultorio Medicina 11	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.

OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400782/19122900283	Consultorio Medicina 12	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400780/19122900280	Consultorio medicina gestantes centro amigable	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL200033/19123000040	Consultorio medicina centro amigable	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: DQCL400783/19122900284	Consultorio Medicina 13	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MARCA: MINDRAY - MODELO: BENEHEART D1 - SERIE: FQ-01046193	Sala de Espera Prioritaria	3835	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Comprobar que el indicador de estado está verde. Comprobar el estado del equipo y de los accesorios. Efectuar la prueba de usuario. Comprobar la fecha de caducidad de los electrodos y de la batería. Prueba de encendido: Cada vez que enciende el equipo, aparece la pantalla de bienvenida y el equipo inicia la prueba de encendido de inmediato. Si se detecta un error, se muestra información relativa al mismo. Prueba en tiempo real: La prueba en tiempo real se mantiene durante todo el periodo de funcionamiento del equipo. Si se detecta un error, se activa la alarma correspondiente. Prueba de la batería: Si la batería está instalada, se efectúa la prueba de la batería de forma automática en 5 minutos tras el encendido del equipo. Puede seguir las instrucciones de pantalla y comprobar lo siguiente: Pulse las teclas de software correspondientes y el botón Descarga como se indica en la pantalla, seleccione una opción para responder al equipo y ha escuchado la indicación de voz. Fecha de calibración: 01 al 30 de Junio de 2023..
BÁSCULA PESA BEBE MARCA: SECA - MODELO: 333 - SERIE: 10000000211722	Sala de Lactancia Materna	3964	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-10	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
INFANTÓMETRO - MARCA: SECA - MODELO: 417 - SERIE: N.R.	Sala de Lactancia Materna	2955	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.

MICROSCOPIO - MARCA: OLYMPUS - MODELO: CX23 - SERIE: 9J87164/201909	Laboratorio clínico	4099	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto óptico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
TENSIOMETRO - MARCA: WELCH ALLYN - MODELO: SHOCK- SERIE: 51103109504	Consultorio Medicina 1	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TALLIMETRO - MARCA: SECA. MODELO: 213	Consultorio Medicina 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TENSIOMETRO - MARCA: WELCH ALLYN - MODELO: TYCOS - SERIE: 080617171243	Consultorio Medicina 3	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
GLUCOMETRO. MARCA: ONCALL PLUS. SERIE: 103A01C056	Sala ERA 1	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo, revisión de tarjeta electrónica y batería, revisión de parámetros, pruebas de funcionamiento y operatividad.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: 19123000031	Consultorio Medicina 4	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
INFANTÓMETRO - MARCA: SECA - MODELO: 417 - SERIE:4171721009	Consultorio Medicina 6	3681	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
INFANTÓMETRO - MARCA: SECA - MODELO: 417 - SERIE: N.R.	Consultorio Medicina 9	2961	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.

TENSIOMETRO PARED. MARCA: ALPK2. SERIE: 4662	Consultorio Medicina 8	177	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazalete, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
DOPPLER MARCA: EDAN. MODELO: SONOTRAX. SERIE: STAB08947291.	Consultorio Medicina 8	2682	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: 19123000200	Consultorio Medicina 7	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
INFANTÓMETRO - MARCA: KRAMER - MODELO: N.R. - SERIE: N.R.	Consultorio Medicina 10	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 522KL PESA BEBES Serie: 5220000424	Consultorio Medicina 10	2203	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA HEALTH O METER MODELO: 142KL. SERIE: 7328	Consultorio Medicina 11	2967	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
DOPPLER MARCA: HUNTLEIGH . MODELO: FD1+. SERIE: FD1FX0341121-10	Consultorio Medicina 11	2682	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
BALANZA HEALTH O METER MODELO: 142KL. SERIE: 2795	Consultorio Medicina 12	2968	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

TENSIOMETRO - MARCA: SECA - MODELO: B10- SERIE: 6004012345867	Consultorio Medicina 12	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
FONENDOSCOPIO. MARCA: LITTMANN. MODELO: LIGHTWEIGHT. SERIE: N.R.	Consultorio Medicina 12	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
EQUIPO DE ORGANOS. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 13010	Consultorio Medicina 12	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
OXIMETRO DE PULSO - MARCA: CONTEC - MODELO: CMS50D - SERIE: 19123000030	Consultorio Medicina 12	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER MODELO: 500KL. SERIE: 20527	Consultorio enfermería 1 Rosado	709	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO - MARCA: ALPK2 - MODELO: ADULTO - SERIE: 795305	Consultorio enfermería 1 Rosado	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TALLIMETRO - MARCA: SECA. MODELO: 213	Consultorio enfermería 3	3540	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
EQUIPO DE ORGANOS. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 13010	Consultorio enfermería 2 Gestantes	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
TENSIOMETRO PARED. MARCA: ALPK2. SERIE: 5058	Consultorio Enfermería 4 Rosado	1688	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

FONENDOSCOPIO. MARCA: N.R.. MODELO: ADULTO. SERIE: N.R.	Consultorio Enfermería 4 Rosado	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
TENSIOMETRO - MARCA: ALPK2 - MODELO: ADULTO - SERIE: 264314	Consultorio Enfermería 5	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
FONENDOSCOPIO. MARCA: LITTMANN. MODELO: LIGHTWEIGHT. SERIE: N.R.	Consultorio Enfermería 5	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
OXÍMETRO DE PULSO - MARCA: HUNTLEIGH - MODELO: MP1R - SERIE: 750AX0104624	Consultorio Medicina Prioritaria 1	2971	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros.
INFANTÓMETRO - MARCA: SECA - MODELO: 416. - SERIE: N.R.	Consultorio Medicina Prioritaria 1	2964	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
TENSIOMETRO - MARCA: ALPK2 - MODELO: ADULTO - SERIE: 873913	Consultorio Medicina Prioritaria 1	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO PARED. MARCA:ALPK2. SERIE: 04902	Consultorio Medicina Prioritaria 2	1682	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
TENSIOMETRO - MARCA: ALPK2 - MODELO: ADULTO - SERIE: 797280	Consultorio Medicina Prioritaria 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
FONENDOSCOPIO. MARCA: CI PRESTIGE. MODELO: ADULTO. SERIE: N.R.	Consultorio Medicina Prioritaria 2	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

EQUIPO DE ORGANOS. MARCA: LENZ. MODELO: GZ-10	Consultorio Medicina Prioritaria 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
TALLIMETRO - MARCA: SECA. MODELO: 213	Consultorio Medicina Prioritaria 2	3913	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TENSIOMETRO PARED. MARCA:ALPK2. SERIE: 4992	Consultorio medicina gestantes centro amigable	1349	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
DOPPLER MARCA: HUNTLEIGH . MODELO: FD1+. SERIE: FD1FX0343477-10	Consultorio medicina gestantes centro amigable	1636	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
TENSIOMETRO - MARCA: WELCH ALLYN - MODELO: SHOCK - SERIE: 080819075633	Consultorio enfermería centro amigable	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
LÁMPARA FOTOCURADO MARCA:DENTSPLY. MODELO:QHL-75	Consultorio Odontología 1	1451	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
BALANZA HEALTH O METER MODELO: 142KL. SERIE: 3508	Consultorio Odontología 2	3508	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
BALANZA HEALTH O METER MODELO: 142KL. SERIE: N.R.	Consultorio Odontología 5	2965	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.

LÁMPARA FOTOCURADO MARCA:DENTSPLY. MODELO:QHL-75	Consultorio Odontología 5	1453	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LÁMPARA FOTOCURADO MARCA:DENTSPLY. MODELO:QHL-75	Consultorio Odontología 6	1452	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
PIEZA DE MANO DE ALTA MARCA: NSK. MODELO: PANAMAX2. SERIE: OBE9370	Consultorio Odontología Centro Amigable	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
LÁMPARA FOTOCURADO MARCA:DENTSPLY. MODELO:QHL-75	Consultorio Odontología PYP	6113	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
BALANZA DE PISO. MARCA: BEURER. MODELO: B621. SERIE: N.R.	Sala ERA 1	3838	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Junio de 2023.
EQUIPO DE ORGANOS. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 13010	Sala ERA 1	N.R.	Trimestral	01-02-08- 09-15-16- 22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

<p>MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: EDAN. MODELO: IM50. SERIE: 360069-M20C19960031</p>	Sala ERA 1	4163	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	<p>Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar el equipo en forma externa. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.). Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG, Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. verificar estado y carga de batería. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.</p>
<p>GLUCOMETRO. MARCA: ONCALL PLUS. SERIE: 103A0242D20</p>	Ambulancia	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	<p>Revisión y limpieza externa del equipo, revisión de tarjeta electrónica y batería, revisión de parámetros, pruebas de funcionamiento y operatividad.</p>
<p>FONENDOSCOPIO. MARCA: N.R. PRESTIGE. MODELO: PEDIATRICO. SERIE: N.R.</p>	Sala ERA 2	N.R.	Trimestral	01-02-08-09-15-16-22-23-29	04-07-11	2023	Gerente / contratista	<p>Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general</p>


DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE MANTENIMIENTO