

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO									
SN3000-PMH									
Nombre de la institución					E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA				
Dirección					CALLE 28 # 15-120		Municipio		DUITAMA
Fecha de Elaboración					8/01/2025		Vigencia		2025
Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 105.000.000									

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	GRUPO	SERVICIO (según registro en REPS)	UBICACIÓN	N° de inventario/ N° Activo fijo	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Referencia de actividades de mantenimiento según recomendaciones de fabricante	Actividades de Mantenimiento
									DD	MM	AAAA			
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	05-20	8059001 / 010108-1001-0032	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	1066	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa / interna 3. Revisar sistema eléctrico y accesorios (cables, enchufes, conectores y terminales) 4. Revisar estado de partes mecánicas (plataforma, ejes y engranajes, etc.) lubricar o reemplazar si es necesario 5. Revisar motor y accesorios (limpieza, lubricación) reemplazar si es necesario 6. Verificar r.p.m. en cada uno de los puntos de selección 7. Comprobar precisión del temporizador 8. Comprobar operatividad de la unidad [en todos los modos de trabajo].
AGITADOR HEMATOLOGICO VASCULANTE	INDULAB	2007	A-2007	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	1042	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa / interna 3. Revisar sistema eléctrico y accesorios (cables, enchufes, conectores y terminales) 4. Revisar estado de partes mecánicas (plataforma, ejes y engranajes, etc.) lubricar o reemplazar si es necesario 5. Revisar motor y accesorios (limpieza, lubricación) reemplazar si es necesario 6. Verificar r.p.m. en cada uno de los puntos de selección 7. Comprobar precisión del temporizador 8. Comprobar operatividad de la unidad [en todos los modos de trabajo].
BALANZA DIGITAL	SECA	813	8813093171673	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 2	3539	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015615	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1	3	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015688	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	30	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015687	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	58	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015677	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 4	82	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015678	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 5	107	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015676	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 6	133	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015626	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 7	162	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015672	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 8	1723	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015684	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 9	203	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015696	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 10	415	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	500000795	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GESTANTES	484	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015625	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 3	439	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5990003230	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE ESTIMULACIÓN	239	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	50000205277	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 1	709	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000021277	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	656	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000001463	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 7	589	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5990003231	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	624	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015683	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS 1	178	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015600	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1715	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015671	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1724	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015673	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	1719	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015674	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	1720	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015652	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	1721	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015651	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	1722	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015695	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	1718	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015637	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	1717	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500015599	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SIRATÁ	1716	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000005129	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1 CENTRO AMIGABLE	1235	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000018578	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2 CENTRO AMIGABLE	1191	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	3500015638	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	1219	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000002127	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA CENTRO AMIGABLE	1271	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000001448	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 1	1391	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000001462	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 2	1309	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	100KL	1000005590	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	DESPLAZAMIENTOS ENFERMERÍA	3507	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	BEURER	89077	D32	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 3	3837	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	142KL	7328	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 11	2967	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	142KL	2795	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	2968	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	20527	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 1 ROSADO	709	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	142KL	3508	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA 2	3508	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	142KL	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA 5	2965	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	BEURER	BG21	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 2	3838	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	HEALTH O METER	100KG	1000005676	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MOVIL OXK295	3510	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BALANZA DIGITAL	KEX	MECANICA	2023-07	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MOVIL OXK184	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC III	4710009	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	1063	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas 6. Verificar perillas de control y señalizaciones 7. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario 8. Verificar el balance del plato con carga 9. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos 10. Verificar medidor de tiempo 11. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.) 12. Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad 13. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).

CENTRIFUGA	HETICH	HAEMATOCRIT	D-78532	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	1061	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas 6. Verificar perillas de control y señalizaciones 7. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario 8. Verificar el balance del plato con carga 9. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos 10. Verificar medidor de tiempo 11. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.) 12. Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad 13. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC III	A 524063	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	3248	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas 6. Verificar perillas de control y señalizaciones 7. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario 8. Verificar el balance del plato con carga 9. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos 10. Verificar medidor de tiempo 11. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.) 12. Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad 13. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	IMP-001	1355901/ 414	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	1043	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Inspeccionar la condición física del equipo 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Limpie el circuito electrónico y ajuste los contactos necesarios. Si es el caso 6. Verificar fuente de poder. Si es necesario 7. Verificar funcionamiento de los controles y pantalla 8. Realizar pruebas de funcionamiento con el operador.
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0343498-10	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GESTANTES	488	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0341121-10	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2 CENTRO AMIGABLE	1188	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0341116-10	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	1385	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.

DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	FD1FX0341121-10	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 11	2682	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1FX0343477-10	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA GESTANTES CENTRO AMIGABLE	1636	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS MEDICINA	1806	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB08947291	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 8	2682	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. 6. Efectuar revisión del transductor. 7. Verificar intensidad de sonido del parlante. 8. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). 9. Verificar el funcionamiento del equipo.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4991	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 10	414	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuó limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4816	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	28	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuó limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4506	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	57	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuó limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4827	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 4	81	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4663	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 5	106	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4508	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 6	132	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4999	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 7	161	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4834	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 9	202	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4582	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 11	1686	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4700	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 3	438	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4917	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1 CENTRO AMIGABLE	1233	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4906	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 2	1307	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	5011	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES	1364	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	5060	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS 1	1687	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	5060	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1680	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4884	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1684	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4952	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	1676	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4738	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	1677	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4821	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	1685	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4969	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	1683	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4822	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	1679	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4517	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	1678	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4601	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SIRATÁ	1681	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	2885	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	500W2	4714	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1	2	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	271816	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	379	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	271861	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 9	355	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIÁTRICO	264314	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 3	6862	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	LORD	PEDIÁTRICO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	297	91207172711	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 2	4575	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N.R.	140207090553	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 1	697	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	91217062331	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS MEDICINA	4573	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	91217062331	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	DESPLAZAMIENTOS ENFERMERÍA	4574	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	TYCOS	PEDIÁTRICO	9408230229	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES	1360	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	106	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	90918195622	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	29	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	61116215301	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 1	563	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	80808203631	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1 CENTRO AMIGABLE	361	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	70227185281	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA CENTRO AMIGABLE	6870	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	110802134	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	DESPLAZAMIENTOS ENFERMERÍA	7195	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ML 182	110329135443	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS MEDICINA	7137	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	51103104504	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 1	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	80617171243	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 3	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	PARED	4662	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 8	177	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	SECA	B10	6004012345867	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	795305	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 1 ROSADO	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	PARED	5058	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 4 ROSADO	1688	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	264314	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 5	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	873913	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 1	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	PARED	4902	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 2	1682	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	797280	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	ALPK2	PARED	4992	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA GESTANTES CENTRO AMIGABLE	1349	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK	80819075633	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERIA CENTRO AMIGABLE	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectué limpieza de filtro, si es el caso 3. Inspeccione: brazalete, pera, válvula, mangueras y reloj 4. Reemplace en caso de ser necesario 5. Ajuste el reloj a cero 6. Verifique la medida con patrón 7. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes 8. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
BÁSCULA PESA BEBE	SECA	333	1000000211722	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	3964	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O MEIER	522KL PESA BEBES	5220001234	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS 1	2568	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220000225	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	2084	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220000245	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	2113	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220000818	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	686	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220000360	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1587	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220001233	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 5	417	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220001255	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 9	211	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220000424	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE LACTANCIA	2033	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	N.R.	FR7220	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL OXK184	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
BÁSCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL PESA BEBES	5220001243	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	1390	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Bandeja) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda 6. Lubricar el sistema mecánico 7. Verificar la calibración de "cero" de la báscula 8. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	MINDRAY	BENEHEART D1	FQ-01046193	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE PROCEDIMIENTOS	3835	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que el indicador de estado está verde. 2. Comprobar el estado del equipo y de los accesorios. 3. Efectuar la prueba de usuario. 4. Comprobar la fecha de caducidad de los electrodos y de la batería. 5. Prueba de encendido: Cada vez que enciende el equipo, aparece la pantalla de bienvenida y el equipo inicia la prueba de encendido de inmediato. Si se detecta un error, se muestra información relativa al mismo. 6. Prueba en tiempo real: La prueba en tiempo real se mantiene durante todo el periodo de funcionamiento del equipo. Si se detecta un error, se activa la alarma correspondiente. 7. Prueba de la batería: Si la batería está instalada, se efectúa la prueba de la batería de forma automática en 5 minutos tras el encendido del equipo. Puede seguir las instrucciones de pantalla y comprobar lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Pulse las teclas de software correspondientes y el botón Descarga como se indica en la pantalla. 7.2 Seleccione una opción para responder al equipo y ha escuchado la indicación de voz. <p>A partir de este momento se prueban otros elementos automáticamente. Si todos los elementos pasan la prueba, el resultado es "Prueba superada". Si se detecta cualquier error, se muestran las indicaciones y los códigos de error correspondientes.</p>

MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M15503310017	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	3045	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Inspeccionar el equipo en forma externa 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.) 6. Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG. Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. 7. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. 8. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. 9. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. 10. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. 11. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. 12. verificar estado y carga de batería. 13. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20C19960031	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	4163	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo 3. Inspeccionar el equipo en forma externa 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.) 6. Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG. Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. 7. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. 8. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. 9. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. 10. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. 11. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. 12. verificar estado y carga de batería. 13. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
ELECTROCARDIOGRAMA	EDAN	SE-601C	360251-M1841402000	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA	3600	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar tensión de entrada o voltaje de baterías 2. Revisión de estabilidad del soporte del equipo 3. Revisión del correcto funcionamiento panel frontal y teclas de mando 4. Verificación funcionamiento de electrodos, cables y fusibles 5. Revisión y limpieza de tarjeta electrónica 6. Verificación de respuesta, calidad de trazo, impresión y transporte del papel 7. Limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	19090	29000	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	6833	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. . Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme la circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	19090	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. . Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme la circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1	330	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	197	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	256	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 4	340	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 5	344	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 6	350	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 7	251	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 8	246	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 9	353	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 10	464	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 11	690	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GESTANTES	567	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 3	4476	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1 CENTRO AMIGABLE	359	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	375	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 2	385	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS MEDICINA	689	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	95001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	DESPLAZAMIENTOS ENFERMERÍA	688	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 2 GESTANTES	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	LENZ	GZ-10	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Lider de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	WELCH ALLYN	13010	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 1	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Limpie totalmente su estructura externa e interna 3. Verifique la carga y descarga de la batería 4. Si el equipo es de pared desarme le circuito fuente para verificar los componentes electrónicos y los conectores de intercomunicación. 5. Limpie sus contactos 6. Verifique el estado de los bombillos tanto del otoscopio, del oftalmoscopio. 7. Compruebe toda la operación del equipo con el operador.
FONENDOSCOPIO	N.R.	N.R.	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	198	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1	331	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	257	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 4	340	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 5	345	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 6	351	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 7	252	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 8	247	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 9	354	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 10	465	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 11	840	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GESTANTES	568	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 1	556	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general

FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA 3	4478	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1 CENTRO AMIGABLE	360	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 2 CENTRO AMIGABLE	4444	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	839	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES	670	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	DESPLAZAMIENTOS ENFERMERÍA	841	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	2450	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS MEDICINA	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	N.R.	ADULTO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	N.R.	ADULTO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIÁTRICO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	N.R.	PEDIÁTRICO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 2	6512	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIÁTRICO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 1	693	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGHTWEIGHT	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general

FONENDOSCOPIO	N.R.	ADULTO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 4 ROSADO	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	LITMANN	LIGHTWEIGHT	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 5	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	CI PRESTIGE	ADULTO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
FONENDOSCOPIO	CI PRESTIGE	PEDIÁTRICO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Limpieza de ductos de la manguera 2. Revisión estado de la membrana 3. Revisión estado de las olivas 4. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa 5. Limpieza general
INFANTOMETRO	SECA	417	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 5	3681	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. 4. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. 5. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 6. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. 7. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad. 8. Entregar el equipo funcionando correctamente.
INFANTOMETRO	SECA	417	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE LACTANCIA	2955	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. 4. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. 5. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 6. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. 7. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad. 8. Entregar el equipo funcionando correctamente.
INFANTOMETRO	SECA	417	4171721009	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 6	3681	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. 4. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. 5. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 6. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. 7. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad. 8. Entregar el equipo funcionando correctamente.
INFANTOMETRO	SECA	417	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 9	2961	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. 4. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. 5. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 6. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. 7. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad. 8. Entregar el equipo funcionando correctamente.

INFANTOMETRO	KRAMER	N.R.	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 10	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. 4. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. 5. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 6. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. 7. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad. 8. Entregar el equipo funcionando correctamente.
INFANTOMETRO	SECA	416	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 1	2964	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. 4. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. 5. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 6. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. 7. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad. 8. Entregar el equipo funcionando correctamente.
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	KRAMER	PISO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS 1	2139	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo 4. Revisar la pantalla reflejante 5. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5.) 6. Verificar el interruptor de encendido/apagado 7. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara 8. Lubricar ruedas si es el caso 9. Verificar el voltaje en el bombillo o foco 10. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario) 11. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	KRAMER	PISO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1988	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo 4. Revisar la pantalla reflejante 5. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5.) 6. Verificar el interruptor de encendido/apagado 7. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara 8. Lubricar ruedas si es el caso 9. Verificar el voltaje en el bombillo o foco 10. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario) 11. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	KRAMER	PISO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	2112	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo 4. Revisar la pantalla reflejante 5. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5.) 6. Verificar el interruptor de encendido/apagado 7. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara 8. Lubricar ruedas si es el caso 9. Verificar el voltaje en el bombillo o foco 10. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario) 11. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación

LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	KRAMER	PISO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	1968	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo 4. Revisar la pantalla reflejante 5. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5.) 6. Verificar el interruptor de encendido/apagado 7. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara 8. Lubricar ruedas si es el caso 9. Verificar el voltaje en el bombillo o foco 10. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario) 11. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	KRAMER	PISO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	2441	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo 4. Revisar la pantalla reflejante 5. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5.) 6. Verificar el interruptor de encendido/apagado 7. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara 8. Lubricar ruedas si es el caso 9. Verificar el voltaje en el bombillo o foco 10. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario) 11. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA I ROSADO	4218	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del encendido 2. Comprobación del circuito eléctrico 3. Limpieza y comprobación de funcionamiento de acrílicos y leds. 4. Verificación de control de intensidad. 5. Verificación de la tensión del sistema mecánico de el brazo. 6. Fusibles: Medir continuidad, verificar el estado del mismo 7. Cable AC: Verificar su estado físico y medir continuidad 8. Control De Intensidad: Revisar que los sensores de proximidad se encuentren funcionando. 9. Estado acrílicos protectores: Observar que no estén rotos o cristalizados 10. Transformador: verificar que no se encuentre en corto (Si aplica) 11. Leds: Verificar que no estén fundidos 12. Tensión Del Sistema Mecánico De Los Brazos: Verificar tensión en el sistema mecánico. 13. Ajuste De Frenos: Si aplica, se da de acuerdo a la necesidad del medico o institución. 14. Verificación de libre movimiento: Verificar estado general de ruedas, libre movimiento de brazo, altitud de brazo.
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO DE ENFERMERÍA CENTRO AMIGO	4219	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del encendido 2. Comprobación del circuito eléctrico 3. Limpieza y comprobación de funcionamiento de acrílicos y leds. 4. Verificación de control de intensidad. 5. Verificación de la tensión del sistema mecánico de el brazo. 6. Fusibles: Medir continuidad, verificar el estado del mismo 7. Cable AC: Verificar su estado físico y medir continuidad 8. Control De Intensidad: Revisar que los sensores de proximidad se encuentren funcionando. 9. Estado acrílicos protectores: Observar que no estén rotos o cristalizados 10. Transformador: verificar que no se encuentre en corto (Si aplica) 11. Leds: Verificar que no estén fundidos 12. Tensión Del Sistema Mecánico De Los Brazos: Verificar tensión en el sistema mecánico. 13. Ajuste De Frenos: Si aplica, se da de acuerdo a la necesidad del medico o institución. 14. Verificación de libre movimiento: Verificar estado general de ruedas, libre movimiento de brazo, altitud de brazo.

LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES	4220	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del encendido 2. Comprobación del circuito eléctrico 3. Limpieza y comprobación de funcionamiento de acrílicos y leds. 4. Verificación de control de intensidad. 5. Verificación de la tensión del sistema mecánico de el brazo. 6. Fusibles: Medir continuidad, verificar el estado del mismo 7. Cable AC: Verificar su estado físico y medir continuidad 8. Control De Intensidad: Revisar que los sensores de proximidad se encuentren funcionando. 9. Estado acrílicos protectores: Observar que no estén rotos o cristalizados 10. Transformador: verificar que no se encuentre en corto (Si aplica) 11. Leds: Verificar que no estén fundidos 12. Tensión Del Sistema Mecánico De Los Brazos: Verificar tensión en el sistema mecánico. 13. Ajuste De Frenos: Si aplica, se da de acuerdo a la necesidad del medico o institución. 14. Verificación de libre movimiento: Verificar estado general de ruedas, libre movimiento de brazo, altitud de brazo.
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N.R.	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	4221	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del encendido 2. Comprobación del circuito eléctrico 3. Limpieza y comprobación de funcionamiento de acrílicos y leds. 4. Verificación de control de intensidad. 5. Verificación de la tensión del sistema mecánico de el brazo. 6. Fusibles: Medir continuidad, verificar el estado del mismo 7. Cable AC: Verificar su estado físico y medir continuidad 8. Control De Intensidad: Revisar que los sensores de proximidad se encuentren funcionando. 9. Estado acrílicos protectores: Observar que no estén rotos o cristalizados 10. Transformador: verificar que no se encuentre en corto (Si aplica) 11. Leds: Verificar que no estén fundidos 12. Tensión Del Sistema Mecánico De Los Brazos: Verificar tensión en el sistema mecánico. 13. Ajuste De Frenos: Si aplica, se da de acuerdo a la necesidad del medico o institución. 14. Verificación de libre movimiento: Verificar estado general de ruedas, libre movimiento de brazo, altitud de brazo.
LÁMPARA DE EXAMEN - CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	4222	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del encendido 2. Comprobación del circuito eléctrico 3. Limpieza y comprobación de funcionamiento de acrílicos y leds. 4. Verificación de control de intensidad. 5. Verificación de la tensión del sistema mecánico de el brazo. 6. Fusibles: Medir continuidad, verificar el estado del mismo 7. Cable AC: Verificar su estado físico y medir continuidad 8. Control De Intensidad: Revisar que los sensores de proximidad se encuentren funcionando. 9. Estado acrílicos protectores: Observar que no estén rotos o cristalizados 10. Transformador: verificar que no se encuentre en corto (Si aplica) 11. Leds: Verificar que no estén fundidos 12. Tensión Del Sistema Mecánico De Los Brazos: Verificar tensión en el sistema mecánico. 13. Ajuste De Frenos: Si aplica, se da de acuerdo a la necesidad del medico o institución. 14. Verificación de libre movimiento: Verificar estado general de ruedas, libre movimiento de brazo, altitud de brazo.
MICROMOTOR	NSK	FX205-B2	B2221770	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte la pieza de mano del motor. 2. Retire el motor del tubo. 3. Gire el motor y compruebe si hay anomalías: como rotación, vibración, ruido anormal y sobrecalentamiento. 4. Limpieza manual de la superficie externa: Retire la suciedad y los restos de la superficie del motor. 5. Realice la lubricación después y antes de cada uso: Retire el motor del tubo, monte la boquilla de pulverización del cabezal en flecha en el conducto de la boquilla del pulverizador (Ver Figura 7 del Manual). 6. Inserte la Boquilla del pulverizador en el conducto de conducción de aire del motor. Sostenga el motor y el pulverizador durante 3 segundos, aplique lubricante hasta que sobresalga de la pieza de aire durante al menos 2 segundos (Ver Figura 8 del Manual). 7. Ponga en funcionamiento el motor durante 10 segundos.

MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX23	9J87164/201909	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	4099	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros) 4. Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general) 5. Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico) 6. Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro 7. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario 8. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador 10. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX23	1K82649	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	4202	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros) 4. Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general) 5. Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico) 6. Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro 7. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario 8. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador 10. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX23	1L81158	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	4203	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros) 4. Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general) 5. Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico) 6. Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro 7. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario 8. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos 9. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador 10. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
NEBULIZADOR	THOMAS	1125	20600008517	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	2270	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Inspeccionar partes mecánicas. 4. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, etc.). 5. Inspeccionar válvulas unidireccionales. 6. Limpiar cámaras y verificar su sello. 7. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. 8. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, empaques de hule y acoples). 9. Verificar flujo máximo [lts./min]. 10. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. 11. Verificar el funcionamiento del equipo.
NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS 1	2691	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.
NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	7250	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.

NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	2689	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.
NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL SIRATÁ	1962	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.
NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	2886	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.
NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	2893	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.
NEGATOSCOPIO	ARDENT	1 CUERPO	N.R.	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	SALA DE RAYOS X ODONTOLÓGICO	1916	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Revisión de tubo, interruptor, cable AC, balasto 3. Pruebas de funcionamiento. 4. Limpieza general.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 1	1098	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 2	4501	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	4499	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	4497	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 5	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 6	6198	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 7	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	1179	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	4936	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAIR MINI	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS ODONTOLOGIA	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubriquéla directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA	NSK	PANAMAX2	OBE9370	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. 5. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. 6. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. 7. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 1	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 5	449	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 6	4482	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 7	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	1621	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	1622	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario. Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA	NSK	EX-203C	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	DESPLAZAMIENTOS ODONTOLOGIA	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. 2. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. 3. Reemplace si es necesario. 4. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. 5. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. 6. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. 7. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. 8. Reemplace si es necesario. Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. 9. Compruebe el funcionamiento con el operador.
SUCCIONADOR	SILFAB	N8V	10-0105-07-A	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	61	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Inspeccionar partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, viela, anillos). 4. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.). 5. Inspeccionar válvulas unidireccionales. 6. Limpiar cámaras y verificar su sello. 7. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. 8. Revisar sellado de nivel de líquido. 9. Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario. 10. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples). 11. Verificar flujo máximo [lts./min]. 12. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. 13. Verificar el funcionamiento del equipo
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 1	3674	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	3675	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 6	3676	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 8	3677	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA 11	3678	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GESTANTES	3680	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO PYP ENFERMERÍA 4	3679	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 2	3906	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	3907	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 4	3909	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 5	3910	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 7	3911	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 9	3912	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	3913	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA CENTRO AMIGO	3914	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 10	3915	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL TRINIDAD	3926	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	3927	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL FLORIDA	3990	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL EL CARMÉN	3938	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL SIRATÁ	3991	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	217	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS	3933	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 2	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONSULTORIO ENFERMERÍA 3	3540	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la correa y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se desliza con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO	SECA	213	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 2	3913	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. 3. Realizar limpieza integral externa del equipo. 4. Verificar que este nivelada la placa de base. 5. Revisar que la correa y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se desliza con gran suavidad. 6. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. 7. Entregar el equipo funcionando correctamente.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	ARDENT	N.R.	N.R.	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	2894	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y operador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	INDUSDENTAL	N.R.	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL AVENDAÑOS 1	2280	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y operador, según sea el caso.

UNIDAD ODONTOLÓGICA	ESQCAM	N.R.	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA FLORIDA	1930	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	ESQCAM	N.R.	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL LA TRINIDAD	3287	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	DINAMIK	626	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL SAN LORENZO	3289	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.

UNIDAD ODONTOLÓGICA	INDUSDENTAL	N.R.	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL SANTA HELENA	2366	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	DINAMIK	V-920 20057	1345	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA SERVICIO EXTRAMURAL SIRATÁ	3285	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011395	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 1	710	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.

UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011401	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 2	691	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011410	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	669	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011402	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	653	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.

UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011429	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 5	637	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011414	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 6	590	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011430	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 7	573	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.

UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	CADEIRA SYNCRUS	4483598001	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	622	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RE11011424	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	611	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.
UNIDAD ODONTOLÓGICA	RITTER	EXCELLENCE	RS08090154	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	1206	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. 2. Verificar estado de mangueras de modulo y escupidera. 3. Reemplazar si es necesario. 4. Verificar fugas de jeringa triple en botones o punta. 5. Reemplazar y lubricar los empaques si es necesario. 6. Drenar agua de tanque, lavándolo varias veces con hipoclorito diluido, dejándolo pasar por todo el circuito de agua. 7. Lubricar válvulas piloto, on-off, cambia vías, reguladora de agua. 8. Verifique el funcionamiento del pedal neumático corrigiendo posibles fugas lubricando y cambiando empaques. 9. Verificar funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y efectuar limpieza de éste. 10. Limpie los contactos del bombillo de la lámpara y verifique la conexión eléctrica de la toma, transformador, interruptor. 11. Reemplace los cables si es necesario. 12. Verifique el voltaje de alimentación a transformador y a bombillo. 13. Verifique el funcionamiento del circuito de negatoscopio. 14. Limpie contactos y cambie las terminales si es necesario. 15. Verifique los sistemas de operación de escaler ultrasónico, lámpara de fotocurado o cualquier otro accesorio que pueda tener la unidad odontológica. 16. Lubricar motores, bujes, ejes, piñones, Electroválvulas o cualquier otro componente mecánico de movimiento para silla, según sea el caso. 17. Verifique el funcionamiento eléctrico, electrónico o mecánico de movimiento silla y escalador, según sea el caso.

AMALGAMADOR	DENTSPLY	PROMIX400	33278	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA 2	695	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DENTSPLY	PROMIX400	33284	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO ODONTOLOGÍA 1	1442	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DENTSPLY	PROMIX400	36005	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	DESPLAZAMIENTO ODONTOLOGÍA	2916	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	AAA1188	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	2891	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DPM	MILLENIUM 2000	AML-17-29077	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	4204	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

AMALGAMADOR	DPM	MILLENIUUM 2000	AML17-29084	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 5	4206	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DPM	MILLENIUUM 2000	AML17-28961	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 6	4207	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DPM	MILLENIUUM 2000	AML17-30015	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	4822	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DPM	MILLENIUUM 2000	AML17-30012	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGO	4820	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 4. Revisar cable de alimentación. 5. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. 6. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control. Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. 7. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. 8. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. 9. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. 10. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. 11. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR	DENTSPLY	GEN 130 PRO	130-26528	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	625	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	DENTSPLY	GEN 130 PRO	130-26518	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	595	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	NSK	VARIOS 370	6910	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	4827	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	NSK	VARIOS 370	5819	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	4826	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	NSK	VARIOS 370	6920	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 1	4825	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	NSK	VARIOS 370	A21X0099	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 6	4723	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	NSK	VARIOS 370	□ A21Y0148	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	4721	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CAVITRÓN - ESCALER ULTRASÓNICO	NSK	VARIOS 370	00005823-A21Z0016-B2220600-021Y0277	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 5	4722	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar cable de alimentación eléctrica 4. Revisar el conector del pedal 5. Verificar solenoide y válvula de aguja 6. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta 7. Revisar la punta 8. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación 9. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CONTRAANGULO	NSK	FX22	2250741	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la tapa del cabezal este bien apretada. 2. Gire la pieza de mano y compruebe si hay anomalías: como rotación, vibración, ruido anormal y sobrecalentamiento. 3. Limpieza manual de la superficie externa: Retire la suciedad y los restos de la superficie de la pieza. 4. Inserte la Boquilla del pulverizador en la parte trasera de la pieza de mano. Sostenga la pieza de mano y el pulverizador durante 3 segundos, aplique lubricante hasta que sobresalga del cabezal de la pieza de mano durante al menos 2 segundos (Ver Figura 8 del Manual).
CONTRAANGULO	NSK	FX22	2250742	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la tapa del cabezal este bien apretada. 2. Gire la pieza de mano y compruebe si hay anomalías: como rotación, vibración, ruido anormal y sobrecalentamiento. 3. Limpieza manual de la superficie externa: Retire la suciedad y los restos de la superficie de la pieza. 4. Inserte la Boquilla del pulverizador en la parte trasera de la pieza de mano. Sostenga la pieza de mano y el pulverizador durante 3 segundos, aplique lubricante hasta que sobresalga del cabezal de la pieza de mano durante al menos 2 segundos (Ver Figura 8 del Manual).
RAYOS X PERIAPICAL	FIAD	FIAD FIRENCE BNB	ZCYD0011	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	SALA DE RAYOS X ODONTOLÓGICO	3632	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Verificar conector de tubo de rayos X 4. Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos 5. Verificar estado de perillas, y lámpara indicadora 6. Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario 7. Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea 8. Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición 9. Verificar funcionamiento con el operador del equipo
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0475BC	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 4	4821	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0532BC	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CENTRO AMIGABLE	4819	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0739BC	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	DESPLAZAMIENTO ODONTOLOGÍA	4664	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0395BC	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3	4209	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	QHL-75	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	6113	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	QHL-75	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 6	1452	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	QHL-75	N.R.	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 1	1451	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	QHL-75	506-36531	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UNIDAD MÓVIL 2	577	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	QHL-75	506-36526	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA PYP	1454	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	QHL-75	506-36527	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 2	1449	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. 2. Efectuar limpieza integral externa del equipo. 3. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo. 5. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. 6. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. 7. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. 8. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MICROPIPETA	BRAND	TRANSFERPETTE	02J32878 / 01F67537	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	46	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador
MICROPIPETA	BRAND	TRANSFERPETTE	11A1700	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	35	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador
MICROPIPETA	HUMAN	HUMANPETTE 19125L	03H99998	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	38	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador
MICROPIPETA	HUMAN	HUMANPETTE 19120L	04H06797	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	40	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador
MICROPIPETA	HUMAN	HUMANPETTE 19120L	05G76923	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	36	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador
MICROPIPETA	HUMAN	HUMANPETTE 19130L	CR61859	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	877	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador

MICROPIPETA	HUMAN	HUMANPETTE 19120L	CS32748	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLÍNICO	876	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar desarme y destape de conductos. 3. Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta 4. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias 5. Verificar estado de elementos 6. Realizar pruebas de pipeteado 7. Pruebas de operación con el operador
OXIMETRO DE PULSO	RIESTER	RI-FOX N	901362	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	AMBULANCIA	429	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	316036-M13300290033	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 2	2724	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	HUNTLEIGH	SMARTSIGNS MINIPULSE	750AAX0102081	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA PRIORITARIA 1	1386	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	316036-M1330020033	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	SALA ERA 1	2859	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL400777/19122900278	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 1	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL200026/19123000034	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 3	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL400778/19122900277	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 5	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL200031/19123000026	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 6	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.

OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL4007797/19122900279	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 7	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL2000027/19123000027	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 8	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL200040/19123000032	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 10	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL2000747/19123000199	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 11	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL400782/19122900283	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DCL400780/19122900280	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE GESTANTES CENTRO AMIGO	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL200033/19123000040	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA CENTRO AMIGO	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQCL400783/19122900284	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 13	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	19123000031	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 4	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor sp02 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.

OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	19123000200	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 7	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	19123000030	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA 12	N.R.	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
OXIMETRO DE PULSO	HUNTLEIGH	MP1TR	750AX0104623	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICINA PRIORITARIA 0	2970	SEMESTRAL	0 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2024	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa 3. Inspeccionar el equipo en forma externa (carcasa, Display) 4. Efectuar limpieza integral interna del equipo 5. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos 6. Verificar el funcionamiento del sensor spO2 (haz de luz y receptor) 7. Revisar estado de baterías.
BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB7	DIN12876-3-K1	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	1055	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada 3. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 4. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos) 5. Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes) 6. Verificar control automático de temperatura 7. Limpie los contactos electrónicos si es el caso 8. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia 9. Inspeccionar lámparas de señalización 10. Comprobar tiempo de alcance de temperatura 11. Verificar el funcionamiento del equipo.
BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	W200	DIN12877-K1	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	1053	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada 3. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 4. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos) 5. Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes) 6. Verificar control automático de temperatura 7. Limpie los contactos electrónicos si es el caso 8. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia 9. Inspeccionar lámparas de señalización 10. Comprobar tiempo de alcance de temperatura 11. Verificar el funcionamiento del equipo.
INCUBADORA CULTIVOS	BINDER	BD53	06-00869	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	1038	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.) 4. Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cableado de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.) 5. Revisar estado y funcionamiento de peñillas, interruptores e indicadores 6. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. 7. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretensión, no circulación del aire, etc.) 8. Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo 9. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5.) 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.

INCUBADORA CULTIVOS	3M	390	70200771809 / 309513	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	3208	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo 2. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo 3. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). 4. Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.) 5. Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores 6. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. 7. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretensión, no circulación del aire, etc.) 8. Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo 9. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5;) 10. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
CABINA DE FLUJO LAMINAR	ESCO	AHC-4D2	2011-56720	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	1040	SEMESTRAL	01 - 20	ABRIL - OCTUBRE	2025	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar limpieza integral del equipo 2. Chequeo de ruidos y vibraciones anormales 3. Medición de amperaje del ventilador 4. Revisión de filtro 5. Verificar funcionamiento de los bombillos. 6. Revisión de interruptores 7. Lubricación de partes mecánicas 8. Pruebas de funcionamiento con el operario

Observaciones: NINGUNA


 GERENTE
 ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO


 LÍDER DE MANTENIMIENTO
 MARVIN LEONEL CARREÑO DAZA