

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección CALLE 28 # 15-120 Municipio DUITAMA

Fecha de Elaboración 7/01/2026 Vigencia 2026

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$ 15.163.541

Nombre del mueble <i>Marca, modelo, serie y/o referencia</i>	GRUPO	SERVICIO (según registro en REPS)	UBICACIÓN	N° de inventario/ N° Activo fijo	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades de mantenimiento
						DD	MM	AAAA		
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Procedimientos	1284	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<ol style="list-style-type: none"> Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Laboratorio Clínico	Laboratorio	1090	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<ol style="list-style-type: none"> Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.
Biombo de tres cuerpos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Crecimiento y desarrollo	1956	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<ol style="list-style-type: none"> Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Consultorio toma citologías	760	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<ol style="list-style-type: none"> Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.
Biombo de tres cuerpos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Consultorio planificación	1957	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<ol style="list-style-type: none"> Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio medicina 10	1585	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<ol style="list-style-type: none"> Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.

Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio Gestantes Enfermería	490	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela (O108)	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 9 Medicina	2038	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 8 Medicina	179	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 7 Medicina	1382	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 6 Medicina	135	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 5 Medicina	206	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 4 Medicina	83	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>

Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 3 Medicina	60	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 2 Medicina	31	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 1 Medicina	4	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela (O900)	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Odontología General	Cons. Odontología PyP	2076	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina Prioritaria 2	257	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina N 11	1586	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Biombo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina 2 C. amigo	1186	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el plegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>

Bimbo de 3 cuerpos con tela	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Med. Gestantes Centro Amigable	1234	ANUAL	01 al 15	4	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ruedas: Limpiar hilos o suciedad en los ejes. Lubricar con silicona en spray si presentan resistencia.</p> <p>2. Bisagras: Verificar que el pliegado sea fluido y no emita ruidos. Ajustar tornillería.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p> <p>4. Frenos: Comprobar que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente.</p>
Escalerilla de dos pasos (O977)	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Vacunación	513	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos (sin placa)	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Procedimientos	1363	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Laboratorio Clínico	Laboratorio	1091	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Servicio Farmaceutico	Farmacia	1030	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Servicio Farmaceutico	Farmacia	1014	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla azul	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Esterilización	173	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>

Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Crecimiento y desarrollo	442	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Consultorio toma citologías	769	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Consultorio planificación	3665	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio medicina 12	3668	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio medicina 10	419	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Consultorio Gestantes Enfermería	486	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Consultorio Electrocardiogramas	1638	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>

Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 9 Medicina	204	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 8 Medicina	180	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 7 Medicina	164	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 6 Medicina	134	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 5 Medicina	109	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 4 Medicina	84	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 3 Medicina	59	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>

Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 2 Medicina	41	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Consultorio 1 Medicina	5	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina Prioritaria 2	3654	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina Prioritaria 1	1381	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
ESCALERILLA DE DOS PASOS	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina N 11	3573	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Medicina 2 C. amigo	N.R.	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Medicina General	Cons. Med. Gestantes Centro Amigable	N.R.	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas, Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>

Escalerilla de dos pasos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	Enfermería	Cons Enfermeria Centro Amigable	N.R.	ANUAL	01 al 15	5	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: revisar presencia de óxido, abolladuras o soldaduras fracturadas. Lijar y pintar si es necesario.</p> <p>2. Estabilidad: revisar que las 4 patas apoyen firmemente si es necesario ajustar nivelación o reemplazar los tacos desgastados.</p> <p>3. Superficie Antideslizante: revisar desgaste de la goma o desprendimiento de los bordes, si es necesario pegar bordes sueltos o reemplazar la lámina de goma.</p>
Tandem plasticos de 4 puestos	OTRO	N.A.	Salas de espera	2562	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados.</p> <p>3. Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem plasticos de 4 puestos	OTRO	N.A.	Salas de espera	2559	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados.</p> <p>3. Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem plasticos de 4 puestos	OTRO	N.A.	Salas de espera	2560	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados.</p> <p>3. Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1646)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2797	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados.</p> <p>3. Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1644)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2795	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados.</p> <p>3. Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>

TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1643)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2794	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1526)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2793	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1521)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2792	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1514)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2785	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1519)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2790	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1518)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2789	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>

TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1517)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2788	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1512)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2783	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem 4 puestos en paño verde (O252)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2094	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem 3 puestos silla en paño verde (O280)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2092	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem 3 puestos silla en paño verde (O279)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2093	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem 3 puestos silla en paño verde (O275)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2091	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>

Tandem 2 puestos silla en paño verde (0273)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2099	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem 2 puestos silla en paño verde (0272)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2086	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem 2 puestos silla en paño verde (0271)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2107	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1645)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2796	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1540)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2685	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1535)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2681	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>

TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1513)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2784	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
Tandem plasticos de 4 puestos	OTRO	N.A.	Salas de espera	N.R.	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1546)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2687	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1541)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2686	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1516)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2787	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1511)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2744	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>

TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1538)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2684	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1536)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2682	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1520)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2791	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM EN TUBO Y SILLA PLASTICA TRES PUESTOS (1515)	OTRO	N.A.	Salas de espera	2786	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM 3 PUESTOS EN ACERO Y ESTRUCTURA CROMADA 180x49x79cm	OTRO	N.A.	Salas de espera	3291-3332	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>
TANDEM 3 PUESTOS EN ACERO Y ESTRUCTURA CROMADA 161x42x66cm	OTRO	N.A.	Salas de espera	3333-3341	ANUAL	01 al 15	8	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Ajuste de Tornillería: revisar y apretar los tornillos que unen el asiento a la viga central y los tornillos de las patas al suelo.</p> <p>2. Nivelación: Comprobar que los niveladores de las patas estén ajustados. 3.</p> <p>Revisión de Estructura: Inspeccionar las uniones de la viga transversal. Si se detecta una fisura, la silla debe ser retirada inmediatamente.</p> <p>4. Estado de los tapones: Verificar que las patas conserven sus protecciones plásticas para no rayar el suelo y mantener la estabilidad.</p>

Mesa auxiliar de mayo cromada con bandeja	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Sala ERA 2do piso	1589	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa auxiliar de mayo cromada con bandeja	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Esterilización	1097	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa auxiliar de mayo cromada con bandeja	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Consultorio toma citologías	0770	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa de mayo	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Consultorio planificación	3663	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa de mayo	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Consultorio Electrocardiogramas	3667	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa auxiliar de mayo cromada con bandeja	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Consultorio Electrocardiogramas	1326	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa auxiliar de mayo cromada (1004) CON BANDEJA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	Cons. Odontología c. amigo	1213	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Mesa auxiliar de mayo cromada con bandeja	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGÍA GENERAL	Cons. Odontología 1	0715	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
MESA DE MAYO	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Consultorio Gestantes Enfermería	3576	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>

MESA DE MAYO	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	CONS. CRONICOS ENFERMERIA	3577	ANUAL	01 al 15	9	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Estructura: Inspección visual en busca de puntos de óxido, abolladuras o grietas en las soldaduras. Lijar y pintar en caso de ser necesario</p> <p>2. Tornillos: Ajustar todos los tornillos de fijación de la bandeja y la base.</p> <p>3. Estabilidad: Comprobar que la base no tenga "juego".</p>
Camilla ginecológica con estribos (1008)	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	Laboratorio	1088	ANUAL	2 al 15	10	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Revisión de Tornillería: Ajustar pernos y tornillos que puedan haberse aflojado por el movimiento constante.</p> <p>2. Estado del Tapizado: Verificar que no existan rupturas. Las grietas son focos de contaminación bacteriana.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p>
Camilla ginecológica en cordoban negro con estribos, cubeta en acero inoxidable pequeña (0763)	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	Consultorio toma citologías	0762	ANUAL	2 al 15	10	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Revisión de Tornillería: Ajustar pernos y tornillos que puedan haberse aflojado por el movimiento constante.</p> <p>2. Estado del Tapizado: Verificar que no existan rupturas. Las grietas son focos de contaminación bacteriana.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p>
Camilla ginecológica con estribos (1012)	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	Consultorio 6 Medicina	0483	ANUAL	2 al 15	10	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Revisión de Tornillería: Ajustar pernos y tornillos que puedan haberse aflojado por el movimiento constante.</p> <p>2. Estado del Tapizado: Verificar que no existan rupturas. Las grietas son focos de contaminación bacteriana.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p>
Camilla ginecológica en cordoban negro con estribos	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	consultorio medicina 11	0131	ANUAL	2 al 15	10	2026	Gerente/ Líder de Mantenimiento/ Contratista	<p>1. Revisión de Tornillería: Ajustar pernos y tornillos que puedan haberse aflojado por el movimiento constante.</p> <p>2. Estado del Tapizado: Verificar que no existan rupturas. Las grietas son focos de contaminación bacteriana.</p> <p>3. Estructura: Inspeccionar presencia de óxido o pérdida de pintura.</p>

OBSERVACIÓN: Ninguna.


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO - GERENTE


MARVING LEONEL CARREÑO DAZA - LÍDER DE MANTENIMIENTO